



# Einsendung von Bronchoalveoläre-Lavage-Proben (BAL)

## FÜR DIE ERREGERDIAGNOSTIK:

Die erste aspirierte Fraktion unfiltriert in ein separates Transportgefäß überführen und bis zum Transport kühl lagern.

▶ Eine Erregerdiagnostik (Kultur und PCR) ist nur aus nativer BAL und nicht aus BAL in Versandmedium möglich!

#### FÜR DIE ZELLDIAGNOSTIK:

Die aspirierte BAL-Flüssigkeit schnellstmöglich bearbeiten, d. h. gut mischen und durch ein Zellsieb filtrieren. Beim Sammeln und weiteren Verarbeiten der BAL nur Polyethylen- oder Polypropylengefäße verwenden.

- Bei Eintreffen der Probe im Labor **bis 14:00 Uhr** des Bronchoskopietages kann die filtrierte BAL **nativ**, unzentrifugiert und ohne Medium transportiert werden. *Bitte erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Laborkurier oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung*. (Telefon Fahrdienstleiter 0751 502-389)
- Bei Eintreffen der Probe im Labor nach 14:00 Uhr des Bronchoskopietages, z. B. aufgrund längerer Transportwege oder Spätabholung, muss die BAL in einem Versandmedium stabilisiert werden. Hierzu die BAL nach Filtration zentrifugieren (10 Min. bei 500 x g, keine Glasgefäße), den Überstand absaugen und nicht abkippen, das Versandmedium zum Zellsediment geben, schonend resuspendieren und im gut verschlossenen Kunststoffgefäß zur (Spät-)Abholung durch den Laborkurier gekühlt bereitstellen. Das Versandmedium sollte gekühlt gelagert werden. Findet eine Farbveränderung von rosa nach gelb statt, verwerfen Sie bitte das Medium! Das Medium kann bis zum aufgedruckten Haltbarkeitsdatum verwendet werden.

BAL bis zur Abholung durch den Laborkurier kühl lagern, jedoch auf keinen Fall tieffrieren.

## MATERIALANNAHME:

Werktäglich (Montag bis Freitag), nicht an Wochenenden und Feiertagen.

Bitte füllen Sie den **speziellen BAL-Anforderschein** vollständig aus und achten Sie auf die eindeutige Beschriftung des Materials.

## BESTELLUNG VON ENTNAHMEMATERIAL:

Transportgefäße, Zellsiebe, vorkonfektioniertes Versandmedium und BAL-Anforderscheine sowie besonders gekennzeichnete Verpackungen können über unsere Einsenderbetreuung bestellt werden:

Telefon: 0751 502-40

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Dr. med. Liane Bronny/Dr. med. Sabine Drache

Ärztliche Leitung Hämatologie Telefon: 0751 502-271 bzw. -269 Dr. rer. nat. Susanne Deininger

Naturwissenschaftlich-technische Leitung Hämatologie

Telefon: 0751 502-315

