

## Aktuelle Laborinformation

Ravensburg, 01.02.2017

### Hinweise zur Probenentnahme für den Quantiferon-Plus-Test

Für die Durchführung des Quantiferon-Plus-Tests zum Nachweis einer latenten oder aktiven Tuberkulose-Infektion sind **spezielle Probenröhrchen** erforderlich (Quantiferon®-TB Gold Plus Blutentnahmeröhrchen), die Sie von uns kostenfrei erhalten.



- **Pro Patient** müssen alle **vier Probenröhrchen** (je eines mit grauem (Negativkontrolle = Nil), grünem (TB1), gelbem (TB2), und lilafarbenem Deckel (Positivkontrolle)) jeweils **bis zur schwarzen Markierung (entspricht 1 ml Blut) mit Blut befüllt** werden. Dies kann durch direktes Einspritzen des Blutes oder durch Abnahme mit einem speziellen Entnahmeset (hierbei Packungsbeilage des Sets beachten!) erfolgen.
- Der Füllvorgang kann langsam vor sich gehen. Nach dem Ende des Füllvorgangs Röhrchen noch 2-3 Sekunden auf der Nadel halten, damit das Röhrchen vollständig gefüllt wird.

➤ **Röhrchen nach dem Befüllen sofort gut schütteln (10x auf und ab schütteln)!** Die gesamte Innenwand der Röhrchen muss mit Blut bedeckt sein.

- Bitte achten Sie darauf, dass alle vier Röhrchen ordnungsgemäß mit den Patientendaten beschriftet sind.

#### Versand der befüllten Röhrchen an das MVZ Labor Ravensburg:

- Die befüllten Röhrchen müssen **innerhalb von 16 Stunden das Labor erreichen** (Lagerung und Transport bei Raumtemperatur).

#### Vorgehen, wenn eine längere Transportzeit zu erwarten ist:

- Ist ein Erreichen des Labors innerhalb von 16 Stunden nicht möglich, so können Sie die **Röhrchen** in Ihrer Praxis bzw. im Krankenhaus **nach der Abnahme für 16-24 Stunden bei 37 °C inkubieren. Dabei müssen die Röhrchen aufrecht stehen!**
- **Nach der Inkubation** müssen die Röhrchen **innerhalb von 3 Tagen das Labor erreichen** (Transport bei Raumtemperatur, Röhrchen können liegend transportiert werden).
- **Bitte beschriften Sie die Röhrchen gut sichtbar mit dem Hinweis „bereits inkubiert“!**

Für weitere Fragen rund um den Quantiferon-Plus-Test stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Bestellung von Quantiferon®-TB Gold Plus Blutentnahmeröhrchen:** Tel. 0751-502 40 (WKG)

**Ärztliche Beratung:** Prof. N. Wellinghausen (Tel. 0751-502 220), Dr. R. Ivanova (0751-502 310)